

Номер байта	Значение
0	0x01 – пакет с результатом измерения
1,2	Не используются
3..6	Результат измерения в ммоль/л, умноженный на 100 (сначала младший байт)
7	Режим работы прибора при измерении: 0 — сыворотка 1 — кровь 2 — моча

Примечания:

1. Остальные данные в пакете следует игнорировать
2. После получения пакета результат необходимо умножить на 1,05.  
Дополнительно для режима:  
— кровь, результат необходимо умножить на 1,2;  
— моча, если результат меньше 2,0 ммоль/л, то он равен нулю. В остальных случаях из результата вычесть 2 ммоль/л и полученное значение умножить на 1,02;
3. Вышеуказанная информация справедлива для приборов версии 3.xx и выше.
4. Приборы версии 4.xx и выше имеют возможность передавать пакеты с расширенной информацией (например, номер прибора, версия, используемый дозатор и прочее).